

みみサポケット 集音器取扱説明書

【ごあいさつ】

この度はみみサポケットをご購入いただき、誠にありがとうございます。
ご自宅でテレビを見る時、大切な人の会話の時に是非ともお使いください。
ご利用者様の生活のサポートが出来ますことを願っております。

【本体説明書】



【本体・部品名称】

Switch O-H-N= スイッチ

「N」: 電源オン

「O」: 電源オフ

「H」: 高音強調モード
(低周波数騒音が軽減します)

Microphone: マイク

Volume Knob: ボリュームダイヤル
ボリュームは7段階の調整ができます。

Earplug: イヤチップ

Earplug base: イヤチップベースプラグ

Earphone: イヤホン

L Plug: イヤホンコードプラグ

Earphone wire: イヤホンコード

【製品仕様】

1. 最大音声出力: 130±5dB
2. 音声ゲイン: 50dB
3. 全高調波歪: ≤5%
4. 周波数範囲: 300~4000Hz
5. 入力ノイズ: ≤30dB
6. 電圧: 直流 1.5V
7. 電流: ≤4mA

【使用方法】

1. イヤホンコードプラグをみみサポケット本体に接続します。
※コードが上になる様に接続してください。
2. ご利用者のサイズに合ったイヤチップとイヤチップベースプラグを接続します。
3. 2で接続したものを次にイヤホンに接続します。
4. イヤチップを聞きたい方の耳に装着します。
5. 音量はボリュームダイヤルで調整します。
※最初は1から始めて徐々にボリュームを上げてください。
※本体のマイク部分を話をする人の口元に持っていくと更に聞こえが良くなります。

乾電池の取り付けについて

単3電池1本をお使いいただけます。
バッテリーボックスを開け、電池を取り付けてください。
+/-が正しいことをご確認ください。
最後は蓋を閉じてご利用いただけます。

【みみサポケットから音が聞こえない場合】

1. 電源を再び入れ直してください。
2. 電池の取り付け方向が正しいかご確認ください。
3. 電池残量が切れている場合は交換ください。
4. イヤホンコードプラグが本体にしっかり接続されているかご確認ください。
5. イヤチップに汚れが付着していないかご確認ください。

【注意事項】

1. 耳に炎症がある方などはご使用前に耳鼻科医にご相談ください。
2. 大音量で長時間使用することはお避けください。
3. ご使用中に気分が悪くなった場合は、使用を中止してください。
4. イヤチップとマイクに異物が入り塞がれると本体の効果に影響を与えますので製品を清潔に維持ください。
5. 湿気、高音になる環境での放置、使用したりしないでください。故障の原因となります。
6. 水や汗で濡れた場合は水分を拭き取ってください。
7. 本体へ過度な衝撃を与えたり、落としたりしないでください。
8. 使わなくなった電池は専用廃棄にて処理ください。
9. 長時間使用しない場合は、電池を取り出してください。
10. 本体は、お子様の手の届かないところで保管ください。

保証書

品名：みみサポケット

お客様名： 様

郵便番号： -

ご住所：

お電話番号：

ご購入店舗名：

ご購入年月日： 年 月 日

保証期間：お買い上げ年月日より1年

※ご購入レシートをご提示ください。

【保証条項】

1. 取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合には、お客様情報を記入したこの保証書と一緒に製品をご購入店舗へお渡しください。保証対応をさせていただきます。
2. 本製品の故障、また使用上生じたお客様の直接、間接の損害につきましても当社はその責を任じません。
3. 通常使用での不具合、または初期不良が対象となります。

【保証対象外条項】

1. 保証内容には本体、各種の紛失は対象外となります。
2. 注意事項に反するお取り扱いによって発生した故障。
3. 火災・地震・水害など天災地変、公害や異常電圧による故障。
4. 保証書無き場合の保証対応はいたしかねます。

【製造元・販売元】

株式会社スリーエム

〒543-0017

大阪府大阪市天王寺区城南寺町 8-22

TEL: 0120-353-393